


このたびは「頻尿(ひんによう)サポーターベルト」のお買い上げ下さいまして、誠に有難うございます。当社は「頻尿(ひんによう)」でお困りの方に少しでも快適な生活、安心な生活リズムになるようにこの製品を考案しました。「頻尿(ひんによう)サポーターベルト」に市販の尿取りパッドを付けて、尿漏れを防ぎます。サポーターベルトに縦(たて)のテープ(下げ緒)に尿取りパッドの両サイドの両サイド(耳余白)をホックでハサミます。ずれ防止になります。働く皆様には便利な「ひんにようサポーターベルト」です。特に働き盛りの方には大変、便利です。男女兼用。運転中や仕事中に、急に尿意を「もよおす」場合には助かります。トイレ内で、容易にパッドを付ける事ができます。この症状の病気の原因は各自の骨盤低筋の老化が原因の一つです。治療はご自身の生活習慣改善にあります。

イラストを参考に、ご覧ください。縦(たて)のテープ(下げ緒)に、A、B、Cがホックの位置になります。

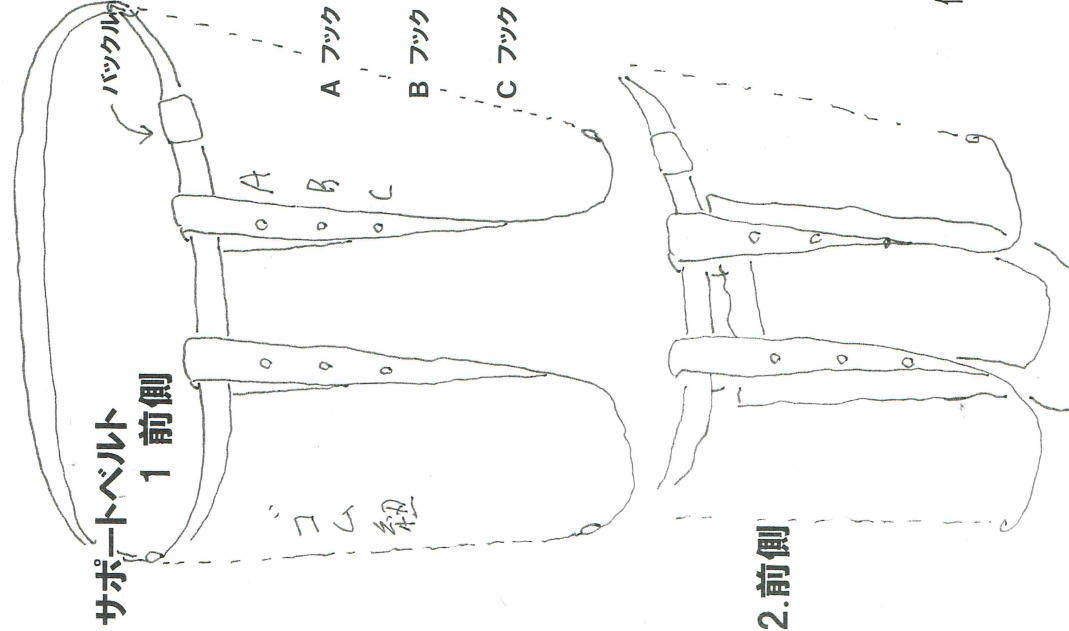

- a, パッドを取り付けるには、パッドのまわりの、薄い(うすい)紙の耳をホックで「はさみ」、動かない様に、します。
- b, パッドは男性用と女性用ではパッドの全長がほとんど同じです。女性の場合、ホックのBから止め始めてご使用ください。個人差があります。体格の大きい女性はAの位置からパッドを止め始めてください。
- c, 外出先での、パッドの取替えが しやすいです。
- d, ベルトはゴムではありません。 綾テ-プにしました。ゴムにしますと、ゴムの劣化があります。この綾テ-プは強くて、洗濯にも強いです。 ネットに入れて洗濯をお願いします。洗濯の場合は、必ずネットを使用して下さい。他の洗濯物との絡(から)みつきを防ぎます。
- e, このサポーターベルトをつけた時の、**ル-ズ(Loose)フイット**が最適です。 通気性が快適です。このサポーターベルトを装着し、その上からトランクスを着(は)いても、違和感があまりありません。通気性はカビや細菌の繁殖を抑えます。
- f, 尿量の多い人は早めに、こまめにパッドを取り替えますと気持ちが変わります。尿量の少ない人は、朝、装着しますと夕方まで持ちますが、個人差はあります。濡れたままのパッドを夕方までしていると、陰部に由来物が発生する事があります。早めの取り換えをしましょう。
- g, トランクスの中にル-プに、ベルトを通し、尿取りパッドを取付けして、ご使用になれます。弊社ではトランクス内側にル-プを縫い付けたトランクスを販売予定を しております。トランクスにはル-プが前と後ろに縫い付けてあります。 近々販売予定。
- h, 仕事中、昼間に装着している時は快適に、安心に過ごせます。 寝る時はサポーターをはずしてお休みください。 洗濯はネットに入れてください。 送料別、返品交換できません。

値段：サイズ大 ¥2800      サイズ小 ¥2300

ウエストサイズ：100cmから対応、      ウエストサイズ：70cmから対応しています。